


# ハーモニー手動さく乳器 かんたんガイド



## ご使用前のチェック

☑ 隔膜に取り付けた軸の向きが正しいか

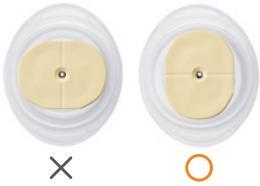

☑ ハンドルの軸にOリングが正しくついているか



☑ ハンドルがしっかりとコネクタに接続されているか

☑ 隔膜の向きは正しいか

☑ 各パーツはきちんと洗浄されているか

☑ さく乳弁の向きは正しいか

さく乳口に対して右か左に向けてください。



さく乳口

コネクタ


さく乳弁と膜

☑ さく乳弁や白い薄膜にキズがないか

## 使い方


赤ちゃんは直接授乳で母乳を飲むとき、最初早いリズムで吸てつしておっぱいを刺激し、母乳が出てくるとゆっくりとしたリズムに変え母乳を飲み取ります。赤ちゃんの自然な吸てつリズムを再現するために、下記のように使用してください。

Step 1

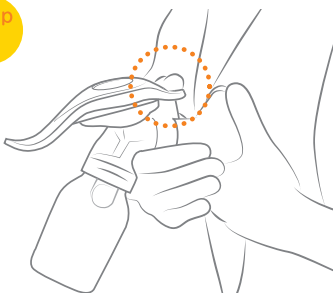

刺激：  
 親指を使ってハンドルの短い柄をすばやく動かします。

Step 2

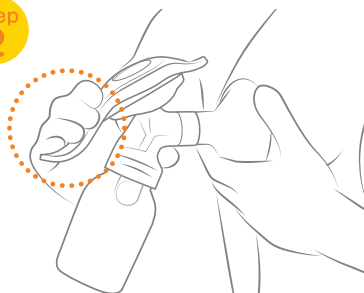

さく乳：  
 母乳が流れ始めたら、ハンドルの長い柄をゆっくり深くまで動かします。

左右どちらの手でもご使用いただけます。



## 洗浄・消毒方法

初回使用時も、必ず下記の洗浄・消毒を行ってからご使用ください。

ポンプセットは図のように、すべて外してください。



### 洗浄

#### 毎回使用後



使用後はすべての部品を毎回洗剤で洗ってください。



食器洗い器での洗浄も可能です。

### 消毒

#### 1日1回



#### 煮沸消毒

分解・洗浄済みの部品を水の状態から浸して、沸騰してから5分以上煮沸させます。



#### 電子レンジスチーム消毒

分解・洗浄済みの部品を電子レンジ消毒専用のケースに入れ消毒させてください。(ケースの使用説明に従ってください)

ハンドルは電子レンジ消毒できません。

薬液消毒は、部品の劣化につながる可能性があるためおすすめしません。

## トラブルシューティング

● 吸引圧が弱い、もしくは吸引しない

▶▶▶▶▶ ご使用前のチェックの項目通り、正しく組み立てられていることをご確認ください。  
特に、Oリングは吸引圧を作るための必須部品です。  
白色のOリングが軸の溝にはまっていることを確認してください。

▶▶▶▶▶ 白い薄膜は消耗品です。さく乳弁にぴったりとくっついていない場合は、新しいものに交換してください。  
(パッケージに予備1枚が同梱されています。)

● かんたんガイドは使用説明書に代わるものではありません。ご使用前に、使用説明書も必ずご確認ください。



お問い合わせ

0120-413920

お客様相談窓口

Email : info@medela.jp

メデラ株式会社

〒151-0073 東京都渋谷区笹塚2-26-2

www.medela.jp

