

KURZANLEITUNG Medela Symphony® PLUS

INITIAL- Programm

INITIIERUNG
DER LAKTATION

ab
Tag 1



8–12x
in 24h

Pumpsitzung ≈ 15 Min.
Stimulations-, Abpump-
und Pausenphasen

Wann von **INITIAL**
zu **ERHALT** wechseln?

1



Wenn in drei **aufeinander
folgenden** Pumpsitzungen je 20 ml
oder mehr abgepumpt wurden



oder

2



Wenn physiologische Marker
der sekretorischen Aktivierung*
sichtbar werden

*Erkennbare Brustdrüsenanschwellung („Milcheinschuss“)

oder

3

Tag 6+

Spätestens ab dem
sechsten Tag Wechsel zum
ERHALT-Programm

ERHALT- Programm

AUFBAU UND ERHALT
DER LAKTATION

ab
Tag 6



8–12x
in 24h


Pumpsitzung ≥ 15 Min.
2-Phase Expression
(Stimulations- und
Abpumpphase)



Hinweis: Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die vollständige Gebrauchsanweisung.
Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung der Symphony.

INITIAL-Programm

Das Programm erkennt man an diesen Symbolen im Display: ●●●

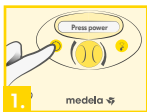

Einschalten



„Let-down“-Taste drücken, um das INITIAL-Programm zu verwenden



Vakuum einstellen



15 Min.


INFO: Programm endet automatisch



youtu.be/lxXK5vW0Tjg

ERHALT-Programm

Das Programm erkennt man an diesen Symbolen im Display: ●●●

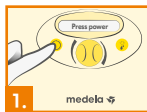

Einschalten



Vakuum einstellen, nach 2 Min. automatischer Wechsel in die Abpumpphase (4.)



Vakuum erneut einstellen



≥ 15 Min.

INFO: Programm endet nicht automatisch



youtu.be/f8y2b94PfPU



Nach 10 Sek. beginnt das ERHALT-Programm



Falls Milch vor Ablauf der 2 Min. zu fließen beginnt, „Let-down“-Taste drücken, um direkt in den Abpumpmodus (4.) zu wechseln

!

WICHTIG! VAKUUM RICHTIG EINSTELLEN/KONTROLLIEREN

Immer die maximale, noch angenehme Vakuumstärke einstellen! So wird der optimale Milchfluss erreicht und besonders effektiv abgepumpt.