

# Guida rapida Symphony® PLUS MEDELA

## Programma INITIATE

AVVIARE LA PRODUZIONE DI LATTE

dopo il parto



8-12x in 24 ore

Sessione di estrazione ≈ 15 minuti

Fasi di stimolazione, fasi di estrazione e pause

1



Una volta estratti almeno 20 ml o più di latte in tre sessioni di estrazione **consecutive**



oppure

2



Quando diventano visibili i marker fisiologici dell'attivazione secretoria\*

\*sensazione di ingorgo mammario (montata lattea)

oppure

3

Giorno 6+

Passare al programma **MAINTAIN** entro e non oltre il giorno 6

Quando occorre passare da **INITIATE** a **MAINTAIN**?

## Programma MAINTAIN

SVILUPPO E MANTENIMENTO DELLA LATTAZIONE

dal giorno 6



8-12x in 24 ore

Sessione di estrazione ≥ 15 min


2-Phase Expression (fase di stimolazione ed estrazione)



Nota: Questa guida rapida non sostituisce le istruzioni per l'uso complete. Consultare le istruzioni per l'uso di Symphony per ulteriori informazioni.

## Programma INITIATE

Quando il programma è in funzione, sullo schermo appaiono i seguenti simboli: ●●●

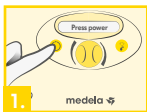

Accendere



Premere il tasto di erogazione per utilizzare il programma INITIATE



Impostare il vuoto




**NOTA:** il programma termina automaticamente



[youtu.be/716iktKsG-s](https://youtu.be/716iktKsG-s)

## Programma MAINTAIN

Quando il programma è in funzione, sullo schermo appaiono i seguenti simboli: ●●●

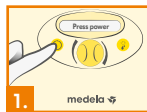

Accendere



Impostare il vuoto.  
Dopo 2 minuti, il sistema passa automaticamente alla fase di estrazione (4.)



Reimpostare il vuoto




**NOTA:** il programma non termina automaticamente



[youtu.be/eUif3RK-rP8](https://youtu.be/eUif3RK-rP8)



Dopo 10 secondi, viene avviato il programma MAINTAIN

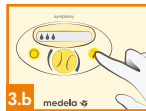

Se il latte inizia a fluire prima che siano trascorsi i due minuti, premere il tasto di erogazione per passare direttamente alla modalità di estrazione (4.).



**IMPORTANTE:**  
IMPOSTARE CORRETTAMENTE IL VUOTO E  
CONTROLLARE/REGOLARE SE NECESSARIO

Utilizzare sempre il massimo livello di vuoto confortevole. Questo aiuta a produrre un flusso di latte ottimale e rende l'estrazione più efficace.