

Medela Symphony® PLUS SKRÓCONY PRZEWODNIK

Program INICJACJA

ROZPOCZĘCIE
LAKTACJI

po
urodzeniu



8–12x
w ciągu
24 godz.

Sesja odciągania
≈ 15 minut

Fazy stymulacji, fazy
odciągania i przerwy

1



Co najmniej 20 ml pokarmu w
trzech **następujących po sobie**
sesjach odciągania



lub

2



Gdy widoczne stają
się fizjologiczne oznaki
aktywacji wydzielania*
*Odczucie obrzęku piersi (napływ mleka)

lub

3

Dzień
6+

Przełącz na
program UTRZYMANIE
nie później niż 6 dnia

Kiedy zmienić ustawienia z
INICJACJA na **UTRZYMANIE**?

Program UTRZYMANIE

BUDOWANIE I
UTRZYMANIE LAKTACJI

od
dnia 6



8–12x
w ciągu
24 godz.

Sesja odciągania
≈ 15 minut


2-Phase Expression
(fazy stymulacji
i odciągania)



Uwaga: Niniejszy skrócony przewodnik nie zastępuje pełnej instrukcji obsługi.
Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi laktatora Symphony.

Program INICJACJA

Po tych symbolach na wyświetlaczu można rozpoznać, że program jest uruchomiony: ●●●

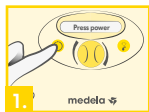

Naciśnij zasil



Naciśnij przycisk „Wyptyw pokarmu”, aby uruchomić program INICJACJA



Ustawić podciśnienie



UWAGA:
Program zakończy się automatycznie




youtu.be/qXUozei-xL4

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar, Szwajcaria

Program UTRZYMANIE

Po tych symbolach na wyświetlaczu można rozpoznać, że program jest uruchomiony: ●●●

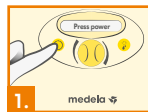

Naciśnij zasil.




Po 10 sekundach rozpocznie się program UTRZYMANIE



Ustawić podciśnienie.

Po 2 minutach system automatycznie przełączy się na fazę odciągania (4.) lub

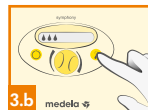

Jeśli mleko zacznie wyptywać z piersi przed upływem dwóch minut, naciśnij przycisk wyptywu pokarmu, aby przejść bezpośrednio do trybu odciągania (4.).



Zresetować podciśnienie



UWAGA:
Program nie kończy się automatycznie



youtu.be/L-TZWrfqT5k

!

WAŻNE! ODPOWIEDNIO USTAWIĆ PODCIŚNIENIE ORAZ W RAZIE POTRZEBY SPRAWDZIĆ/WYREGULOWAĆ

Należy zawsze używać maksymalnego, komfortowego poziomu podciśnienia. Pomaga to uzyskać optymalny wyptyw mleka i sprawia, że odciąganie jest najskuteczniejsze.

medela
THE SCIENCE OF CARE™