

GUIA RÁPIDO Medela Symphony® PLUS

Programa INICIAR

INICIAR O ALEITAMENTO

após o nascimento



8-12x em 24h

Sessão de extração ≈ 15 min.

Fases de estimulação, fases de extração e pausas

Quando mudar de **INICIAR** para **MANUTENÇÃO**?

1



Em três sessões de extração **consecutivas**, pelo menos uma vez são extraídos 20 ml ou mais



ou

2



Quando os marcadores fisiológicos da ativação secretória* ficam visíveis

*sensação de engorgitamento da mama (descida do leite)

ou

3

Dia 6 +

Mude para o **programa MANUTENÇÃO** o mais tardar no dia 6

Programa MANUTENÇÃO

DESENVOLVER E MANTER O ALEITAMENTO

a partir do dia 6



8-12x em 24h

Sessão de extração ≈ 15 min.


2-Phase Expression (fase de estimulação e extração)



Nota: Este guia rápido não substitui as instruções de utilização completas. Consulte as instruções de utilização do Symphony para obter mais informação.

Programa INICIAR

Pode perceber que este programa está a ser executado a partir destes símbolos no visor: ●●●

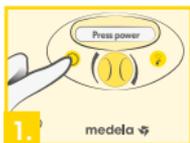

Prima Power



Prima o botão "extração" para utilizar o **programa INICIAR**



Definir um vácuo



NOTA:

O programa termina automaticamente


PROGRAMA INICIAR




https://www.medela.pt/amamentacao-para-profissionais-saude/produtos/extracao/como-utilizar-o-extrator-de-leite-symphony?utm_source=qr&utm_medium=offline&utm_campaign=symphony

Programa MANUTENÇÃO

Pode perceber que este programa está a ser executado a partir destes símbolos no visor: ●●●

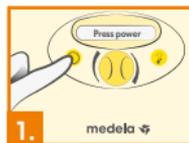

Prima Power

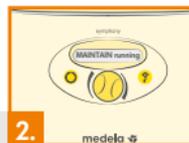

Após 10 segundos, o **programa MANUTENÇÃO** inicia



3.a

Definir um vácuo.
Após 2 minutos, o sistema muda automaticamente para a fase de extração (4.)



3.b

Se o leite começar a fluir antes dos dois minutos terem passado, prima o botão "extração" para mudar diretamente para o modo de extração (4.).



4.

Redefinir um vácuo



NOTA:

O programa não termina automaticamente

PROGRAMA MANUTENÇÃO



https://www.medela.pt/amamentacao-para-profissionais-saude/produtos/extracao/como-utilizar-o-extrator-de-leite-symphony?utm_source=qr&utm_medium=offline&utm_campaign=symphony

!

IMPORTANTE! DEFINIR O VÁCUO CORRETAMENTE E VERIFICAR/AJUSTAR SE NECESSÁRIO

Utilize sempre o nível de vácuo máximo confortável. Isto ajuda a produzir um fluxo de leite ideal e torna a extração mais eficaz.